

Composition du colis



NOTICE D'UTILISATION

Indications

Soins postopératoires, traitement antalgique, traumatologie sportive (entorse, déchirure...), après séance de rééducation...

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud, cryoglobulinémie, artérite, diabète, polyarthrite...

Précautions d'utilisation

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Des caractères favorisent le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, gros fumeurs, peaux fragiles, diabétiques insulino-dépendants...): une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste).

Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la peau.

Ne pas percer le pack de froid.

En cas de fuite, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau. Pour plus d'informations, contacter la société Orthonov ou consulter le site www.orthonov.com

En cas de contact direct du gel avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Contactez votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas laisser à la portée des enfants ni des personnes âgées inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

Le releveur de pied PODAL'ICE est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.

Les packs de froid sont lavables à la main avec un savon doux. Ne pas les immerger dans un bain détergent désinfectant mais les pulvériser avec une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Bien placer le robinet en position F.

Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contacter la société Orthonov.



PODAL'ICE Attelle de Pied de Cryothérapie Compressive



AVERTISSEMENT



En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste), et contacter la société Orthonov : 01 60 13 65 73 ou via le site www.orthonov.com



Fabricant



Avertissement
(Bien lire la notice
d'utilisation)



Lavage à la main



Séchage
en machine
ou à sec interdit



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Ne pas ouvrir
avec un objet
coupant



Conforme
aux exigences
de l'Union Européenne



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@orthonov.paris
www.orthonov.com

Releveur de pied (à utiliser selon la prescription de votre médecin)



1

Placer la sangle malléolaire au niveau de la cheville.




2

Bien serrer et fixer le velcro.




3

Passer la sangle de serrage dans la boucle.

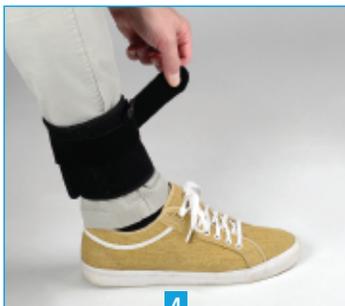

4

Rabattre la sangle de serrage et fixer sur la sangle malléolaire.

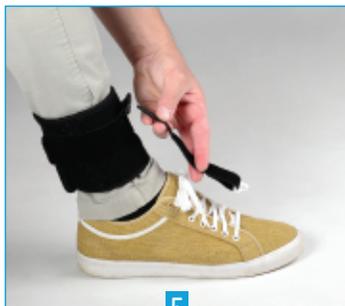


5

Positionner la sangle de traction avec le crochet vers le bas.




6

Passer l'extrémité de la sangle de traction dans la boucle verticale.

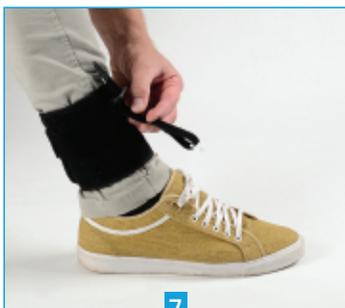


7

Fixer le velcro.

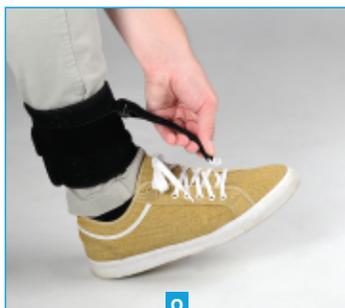

8

Passer le crochet de la sangle de traction dans le lacet.

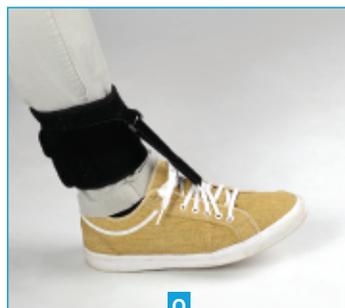

9

Bon positionnement du releveur de pied.

Pack de froid



1

Enfiler le jersey. Le pack de froid ne doit jamais être en contact direct avec la peau.



2

Après 8h au congélateur (température entre -18 et -22°C), sortir le pack de froid et répartir le gel si nécessaire.



3

Placer le pack de froid sur une surface plane. La partie arrondie devra être au niveau du talon.



4

Rabattre la partie gauche sur le pied.



5

Passer la partie droite par-dessus la partie gauche et fixer les velcros.




6

Positionner la sangle de talon.



7

Faire le tour du talon et fixer le velcro.

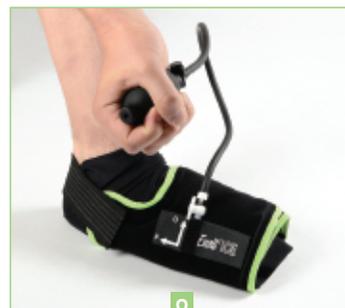

8

Placer le robinet sur 0 et visser la pompe. Gonfler (ne pas dépasser 10 pressions). Mettre le robinet sur F et dévisser la pompe.



9

Après 20 min, mettre le robinet sur 0 et défaire les sangles. Essuyer puis replacer le pack de froid dans le sachet, puis au congélateur.