



FORMULAIRE DE COMMANDE

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Code porte: Rdc: Étage:

Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)

Date d'intervention (si urgent): / /

Téléphone:

Email:

Médecin prescripteur:

Remplir ce formulaire et l'envoyer avec le chèque de règlement dûment rempli à l'ordre de «Orthonov» à l'adresse suivante:

Orthonov,
3 rue de Villebon-91160 Saulx-les-Chartreux

Cachet du Médecin prescripteur:

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les instructions de la notice d'utilisation accompagnant le dispositif médical ou faites appel aux conseils d'un chirurgien, pharmacien ou professionnel de santé habilité.

COMMENT COMMANDER

Pour commander votre attelle, vous avez plusieurs possibilités:

- **Soit par internet:** sur le site www.orthonov.com (paiement sécurisé 3D secure)



- **Soit par courrier :** en remplissant le formulaire au dos et en l'envoyant avec votre chèque de règlement, rempli à l'ordre de "Orthonov", à l'adresse mentionnée au bas du formulaire.

- **Soit par téléphone :** en appelant le 01 60 13 65 73 et en réglant par carte bancaire (paiement sécurisé). Une fois votre commande validée, votre attelle vous sera livrée par transporteur à l'adresse de livraison mentionnée sur le bon de commande. Une facture sera jointe à cet envoi.

À réception de votre commande, vous aurez deux semaines pour la modifier ou l'annuler en nous renvoyant votre attelle dans son emballage d'origine, à vos frais, à condition que celle-ci n'ait été ni portée, ni endommagée.

Pour toutes autres questions ou renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

par téléphone au 01 60 13 65 73
par mail à contact@orthonov.paris



Excell'ICE

**Prenez
de l'avance!**

Orthonov,

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37

Fabriqué en France



ATTELLES DE CRYOTHÉRAPIE

La **Cryothérapie** (traitement par le froid) est connue depuis l'antiquité mais n'a commencé à être appliquée à la médecine qu'à partir des années 70.

Les attelles **ICENOV** et **EXCELL'ICE** combinent les avantages de la contention et de la cryothérapie. Elles se composent d'une attelle d'immobilisation et d'un système de packs de froid gonflable au moyen d'une pompe manuelle. La compression obtenue permet de décupler la pénétration du froid, en profondeur, dans les tissus et d'épouser de façon optimale l'anatomie du membre traité.

Les attelles **ICENOV** et **EXCELL'ICE** sont particulièrement efficaces pour apporter à la fois un effet antalgique, réduire l'inflammation et l'œdème, tout en contribuant à résorber les hématomes. Elles constituent ainsi une aide extrêmement efficace à la rééducation et peuvent être utilisées aussi bien dans les protocoles postopératoires RRAC, RAAC ou Rapid Recovery... que pour la prise en charge des douleurs ressenties lors de la survenue d'entorses (protocole RICE), tendinites, claquages musculaires...

Pompe manuelle de compression



Pack de froid antérieur

Pack de froid postérieur

Vous pouvez passer votre commande directement sur notre site web:

www.orthonov.com

ou en téléphonant au: 01 60 13 65 73

Principe

Par des phénomènes vasomoteurs, biochimiques et de neuroconduction, le froid en pression produit plusieurs effets particulièrement bénéfiques en traumatologie et dans les suites postopératoires:

- Effet antalgique

L'abaissement de la température provoque localement une sorte d'**anesthésie**, qui engendre un effet **analgésique** (diminution des douleurs).

- Effet anti-inflammatoire

Le froid en **pression** réduit l'activité métabolique en générant une forte diminution des enzymes responsables de l'inflammation et de leur activité.

- Effet anti-hémorragique

La température et la vitesse de refroidissement des tissus influencent les effets vasomoteurs qui, associés à la pression, génère une vasoconstriction à l'origine de la baisse du débit sanguin.

- Effet myorelaxant

Suite à l'application de froid, des voies réflexes médullaires produisent une forte inhibition des moto-neurones gamma et par conséquent une importante réduction du tonus musculaire ; cela a pour effet de stimuler la guérison des muscles et des tissus.

La combinaison de ces effets permet à nos attelles d'être un outil indispensable pour une récupération plus rapide avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.

SONOV

La socquette **SONOV** est un dispositif médical de contention de l'avant-pied, qui s'utilise après le retrait des pansements post opératoires. Elle permet de contenir l'œdème pendant la journée, tout en améliorant la reprise de la marche.

Rejoignez-nous!



Conçu et fabriqué en France

BON DE COMMANDE

Pour toute commande par correspondance, veuillez cocher le (ou les) modèle(s) choisi(s) dans la case située en haut à gauche.

Attelle de Genou Articulée Excell'Ice

Réf.: ORT40GEN-A



Prix: 102,29 €*

Attelle de Reprise d'activité Excell'Ice

Réf.: ORT40GEN-RA



Prix: 102,29 €*

Attelle Releveur de Pied de Cryothérapie

Réf.: ORT30PIED-R



Prix: 76,22 €*

Attelle de Cheville Talaria

Réf.: ORT30TALA-U



Prix: 42,00 €*

Housse de Protection Protecnov Pied

Réf.: ORT10PIED-P



Prix: 18,00 €* (H 29 cm)

Housse de Protection Protecnov Jambe

Réf.: ORT10JAMB-P



Prix: 19,00 €* (H 73 cm)

Pack Pied OPTIMUM - Attelle Releveur de Pied + Sonov + Housse de Protection pour Pied



Prix: 121,00 €*

* Frais de port offert (prix public conseillé)