

Indications

Soins postopératoires de chirurgie de la cheville, traitement antalgique, traumatologie sportive (entorse...) après séance de rééducation. Effets antalgique, anti-oedémateux, anti-hémorragique.

Précautions d'utilisation

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, gros fumeurs, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile): une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste).

⚠ Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ni avec la peau. Utiliser systématiquement un tissu. Si le pack de froid n'est pas malléable et/ou présente du givre, attendre qu'ils s'assouplissent et dégivrent avant utilisation.

Ne pas percer le pack de froid, ni la pompe manuelle et son tuyau de raccordement.

En cas de fuite: ne pas ingérer le gel, manipuler avec des gants, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau. Ne pas jeter dans la nature, ni avec les ordures ménagères.

Pour plus d'informations, contacter la société Orthonov ou consulter le site www.orthonov.com

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Contactez votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas chauffer le pack de froid.

Ne pas utiliser en cas de dégradation.

Ne pas laisser à la portée des enfants ni des personnes âgées inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

L'attelle d'immobilisation de la cheville et le lycra sont lavables à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas l'immerger dans un bain détergent désinfectant mais le pulvériser avec une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Bien placer le robinet en position F. Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation. Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contactez la société Orthonov.



AVERTISSEMENT



En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste), et contacter la société Orthonov : 01 60 13 65 73 ou via le site www.orthonov.com

En cas de contact avec le gel, rincer abondamment avec de l'eau froide et consulter votre médecin.

En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Respecter les consignes d'utilisation



Date limite d'utilisation



Lire la notice d'utilisation



Fabriqué dans le lot



Sans latex



Lavage à la main



Dispositif médical



Séchage en machine ou à sec interdit



Référence



Sans phtalates



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Un seul patient - à usage multiple



-30°C - 40°C
Température limite



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@orthonov.com
www.orthonov.com

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud, artérite, cryoglobulinémie, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée...

FABRIQUÉ
EN FRANCE



NOTICE
D'UTILISATION

Excell'ICE

ATTELLE TALARIA Attelle de Cheville de Cryothérapie Compressive



Composition du colis

Réf. ORT40TALA-U



1 pack de froid



1 jersey



1 attelle d'immobilisation de cheville



1 sac congélation



1 pompe manuelle

Dispositif à usage individuel

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

Attelle d'immobilisation de cheville




1

Défaire la 1^{ère} sangle de fixation latérale...



2

... puis la seconde.

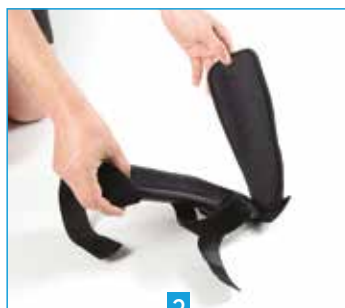

3

Ouvrir ensuite l'attelle. La partie en tissu devra être placée sous le talon.



4

Insérer la cheville et le pied en positionnant les coques sur chaque malléole.



5

Si vous êtes trop serré(e), défaire de chaque côté, le scratch vertical placé en bas.



6

Puis ajuster la largeur du tissu placé entre les 2 coques, en tirant sur les petites sangles verticales.



7

Lorsque l'espacement entre les coques est suffisant, fermer la 1^{ère} sangle de fixation latérale...



8

... puis la seconde.



9

Bon positionnement de l'attelle d'immobilisation.

Pack de froid




1

Enfiler le jersey. Le pack de froid ne doit jamais être en contact direct avec la peau.



2

Après 8h au congélateur (température entre -18 et -22°C), sortir le pack de froid.

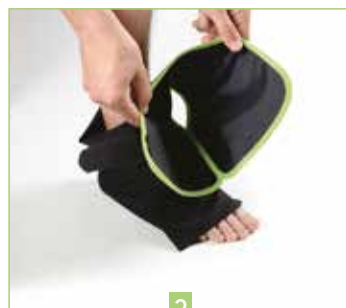

3

Répartir le gel si nécessaire. Le liseré vert devra se situer sous la plante du pied.



4

Insérer le pied dans le pack de froid, en plaçant bien le talon dans l'ouverture.



5

Rabattre la partie gauche du pack de froid sur le pied et saisir le velcro fixé sur la partie droite.



6

Rabattre la partie droite du pack de froid sur le pied et fixer le velcro.



7

Placer le robinet sur 0 et visser la pompe.



8

Gonfler (ne pas dépasser 10 pressions). Mettre le robinet sur F et dévisser la pompe.



9

Après 20min, mettre le robinet sur 0 et défaire le velcro. Essuyer et replacer le pack de froid dans le sachet, puis au congélateur.