

Indications

Déficiences temporaires de la paroi abdominale post partum, contusions et fractures des côtes ou du sternum... Usage postopératoire de chirurgie abdominale, ou de chirurgie de la hanche.
Effets antalgique, anti-oedémateux, antihémorragique.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.).

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Il est impératif de vérifier l'intégralité et l'intégrité des éléments du contenu avant son utilisation. Ne pas utiliser en cas de dégradation.

Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, tabagisme excessif, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile) : une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ou la peau. Utiliser systématiquement un tissu.

Le pack de froid doit être souple et ne pas présenter de givre avant utilisation.

Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid.

Ne pas percer le pack de froid.

En cas de fuite du gel : manipuler le dispositif avec des gants, ne pas ingérer le gel, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau.

Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie.

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide.

Contactez votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

La ceinture de soutien abdominal KHip'Cool est lavable à la main avec un savon doux.

Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel.

Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant.

Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Toujours placer le robinet en position F. Laisser sécher à plat à l'air libre.

Pour plus d'informations, contacter la société Orthonov ou consulter le site www.orthonov.com



AVERTISSEMENT



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.), et contacter la société Orthonov : 01 60 13 65 73 ou via le site www.orthonov.com

En cas de réaction grave, contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité produit



Un seul patient à usage multiple



Référence



Durée optimale d'utilisation



Température limite



Lire la notice d'utilisation



Respecter les consignes d'utilisation



Sans phthalates



Sans latex



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Lavage à la main



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Séchage en machine ou à sec interdit



Dangereux pour l'environnement



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@orthonov.com
www.orthonov.com

Notice d'utilisation de ceinture de soutien abdominal 2023/08/V4

NOTICE D'UTILISATION



Ceinture de soutien abdominal / hanche KHip'Cool + Pack de Cryothérapie Compressive



FR



EN

Composition du colis :

Réf. ORT40HAN-ABD



1 sac de congélation



1 ceinture de soutien abdominal



1 rallonge



1 pompe manuelle



1 pack de froid



1 sangle de cuisse



1 rallonge de sangle de cuisse



1 valisette

Utilisation comme ceinture abdominale




1

La ceinture abdominale contient 4 baleines : 2 rigides pour le dos et 2 plus souples pour l'abdomen.




2

Placer la ceinture avec les baleines rigides dans le dos. Prendre la partie avec les 3 velcros dans la main droite.

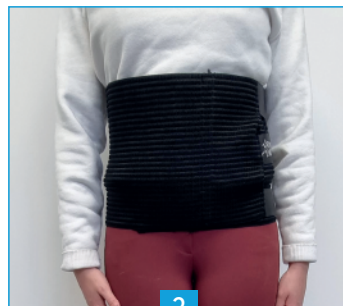

3

Rabattre la partie gauche puis rabattre la partie droite par-dessus, et fixer les 3 velcros.

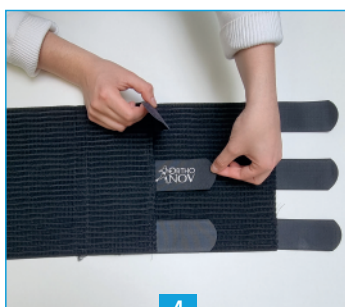

4

En cas de nécessité, une rallonge peut être utilisée.

Cryothérapie pour l'abdomen



5

Placer le pack de froid dans le sachet hermétique, puis mettre l'ensemble au congélateur (entre -18 et -22°C) pendant 8h avant utilisation.



6

Placer le pack de froid à l'intérieur de la ceinture, à proximité du bord sans velcro (B). Veiller à ce que le velcro (V) soit situé vers le haut, le liseré vert aligné avec le bord supérieur de la ceinture.



7

Positionner le pack de froid sur le ventre. La partie dépassant de la ceinture doit se situer vers le bas. Ne pas tenir compte du robinet.



8

Fermer la ceinture. Utiliser la rallonge si nécessaire. Ne pas appliquer de compression.



9

Après 20 minutes, ouvrir la ceinture abdominale, et retirer le pack de froid, puis le replacer dans le sachet et le remettre dans le congélateur.

Cryothérapie pour la hanche



10

Positionner la ceinture abdominale avec les baleines rigides dans le dos, puis placer le pack de froid à l'intérieur de la ceinture de manière à laisser le robinet apparent, et orienté vers le haut.



11

Recouvrir la partie douloureuse avec le pack de froid, que ce soit plutôt sur le devant (après une chirurgie de la hanche par voie antérieure)...



12

... ou l'arrière (après une chirurgie de la hanche par voie postérieure) en fonction de l'emplacement de la cicatrice. Utiliser la rallonge si nécessaire.



13

Fixer la sangle de cuisse sur le bas du pack de froid.




14

Faire le tour de la cuisse...



15

... puis fixer la sangle de l'autre côté de la cuisse.

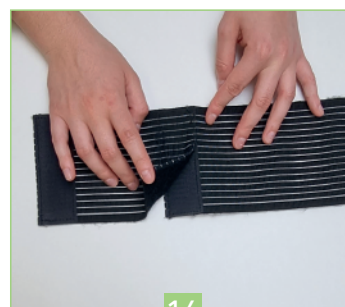

16

Utiliser la rallonge de cuisse si nécessaire.



17

Veiller à ce que le robinet soit sur la position O. Gonfler sans dépasser 10 pressions. Placer le robinet sur F puis dévisser la pompe.



18

Après 20 minutes, placer le robinet sur O, ouvrir la ceinture abdominale et retirer le pack de froid. Replacer celui-ci dans le sachet puis remettre l'ensemble dans le congélateur.