

Excell'ICE



Dispositivo universale per crioterapia compressiva della caviglia

Composizione della confezione

Rif. ORT40PACK-CH



Impacco freddo



Pompa manuale



Sacchetto per congelatore



Lycra



Valigia

ISTRUZIONI PER L'USO



1 Indossare gli indumenti in lycra. L'impacco freddo non deve mai essere a contatto diretto con la pelle.



2 Dopo 8 ore di congelamento (tra -18 e -22°C), togliere l'impacco freddo.



3 Se necessario, distribuire il gel. Il bordo verde deve trovarsi sotto la pianta del piede.



4 Posizionare il piede nell'impacco freddo. Il tallone deve trovarsi nel foro.



5 Ripiegare la parte sinistra dell'impacco freddo sul piede e togliere il velcro dal lato destro.



6 Ripiegare la parte destra dell'impacco freddo sul lato sinistro e fissare il velcro.



7 Ruotare il rubinetto su 0 e avvitare la pompa



8 Gonfiare (non superare le 10 pressioni). Girare il rubinetto su F e svitare la pompa.



9 Dopo 20 minuti, portare il rubinetto in posizione 0 e slacciare il cinturino. Allargare e rimettere le confezioni fredde nella borsa e riportele nel congelatore.

Indicazioni per l'uso

Tattamento post-operatorio, trattamento antalgico, traumi sportivi (distorsione, strappo, ecc.), dopo una sessione di riabilitazione...

Controindicazioni

Allergia al freddo, insensibilità al freddo, sindrome di Raynaud, crioglobulinemia, arterite, diabete, poliartrite...

Precauzioni per l'uso

Il produttore non garantisce che l'uso di questo prodotto eviti il verificarsi di una lesione. Se l'utente presenta caratteristiche che favoriscono il rischio di ustioni cutanee (ad esempio, pazienti malnutriti, forti fumatori, pelle fragile, diabetici insulino-dipendenti, ecc).

Questo dispositivo medico deve essere utilizzato come prescritto dal chirurgo o dal medico o secondo le raccomandazioni d'uso del professionista sanitario debitamente autorizzato (ad es. farmacista, fisioterapista, ortesista).

L'impacco freddo non deve mai entrare in contatto diretto con la pelle.

Non forare l'impacco freddo.

In caso di perdite, non gettare il gel in una rete fognaria o in un corso d'acqua.

Per ulteriori informazioni, contattare Orthonov o visitare il sito www.orthonov.com.

Se il gel viene a contatto diretto con la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Contattare il medico in caso di irritazione persistente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini o degli anziani che non sono in grado di utilizzare questo dispositivo.

Manutenzione

L'impacco freddo può essere lavato a mano con un sapone neutro. Non immergerlo in un bagno di detergente disinfettante, ma spruzzarlo con una soluzione detergente disinfettante (si consiglia il detergente disinfettante per superfici elevate ANIOS). Accertarsi che il rubinetto sia in posizione F.

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato con il marchio CE, ai sensi di questa normativa. Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente le presenti istruzioni e rispettare le raccomandazioni d'uso.

⚠ ATTENZIONE ⚠

In caso di dolore, gonfiore, sensazioni insolite, reazione infiammatoria o allergica, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo medico e consultare il prima possibile il medico, il chirurgo o un professionista sanitario autorizzato (ad es. farmacista, fisioterapista, ortesista) e contattare Orthonov:

+33 1 60 13 65 73 o www.orthonov.com

In caso di contatto con il gel, sciacquare abbondantemente con acqua fredda e consultare il medico.



Dispositivo medico



Marchio CE



Tracciabilità del prodotto



Uso multiplo per un singolo paziente



Codice lotto



Data di scadenza



Limite di temperatura



Consultare le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE consultare la documentazione di accompagnamento



Nessun ftalati



Nessun lattice



Non tagliare



Lavare a mano



Non stirare



Non candeggiare



Asciugatura a secco



Pericoloso per l'ambiente



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France

Telefono: +33 1 60 13 65 73 Fax: +33 1 69 15 06 37 Email: contact@orthonov.com

www.orthonov.com